

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA

- test na wykrycie wirusa HPV –

Sposób postępowania:

1. Wyjąć probówkę z opakowania i nakleić na nią pierwszą etykietę z indywidualnym numerem testu.
2. Wyjąć szczoteczkę z jałowego opakowania i pobrać wymaz cytologiczny z szyjki macicy.

UWAGA! U kobiet w ciąży nie należy wprowadzać szczoteczki głęboko do kanału szyjki macicy.

U mężczyzn wymaz należy pobrać szczoteczką kilkakrotnie pocierając miejsce zmienione chorobowo, lub w przypadku niezauważalnych zmian potrzebować całą długość rowka założonego dookoła penisa ruchem spiralnym.

Pobranie materiału z cewki moczowej:

- **u kobiet:** w celu pobrania wymazu, ucisnąć lekko cewkę moczową przez ścianę przedsionka pochwy, wprowadzić wymazówkę i kilka razy obrócić w jednym kierunku
- **u mężczyzn:** cienką wymazówkę należy wprowadzić 1-2 cm w głąb cewki moczowej, następnie należy obrócić ją kilkakrotnie

3. Odkręcić probówkę i umieścić w niej białą końcówkę z niebieskiej szczoteczki (należy ją zsunąć), lub ułamać końcówkę szczoteczki przeznaczonej do wymazu z cewki. Następnie szczelnie zakręcić probówkę.

UWAGA! Przy otwieraniu probówki należy zachować szczególną ostrożność - zawarty w niej bufor jest toksyczny. Otwierać tylko w rękawiczkach!

4. Wypełnić protokół pobrania materiału dla laboratorium, nakleić na nim drugą etykietę z indywidualnym numerem testu i umieścić wraz z probówką w pudełku.

W skład zestawu wchodzi:

1. Szczoteczka do pobrania wymazu
2. Probówka zawierająca toksyczny bufor
3. Ulotka informacyjna dla pacjenta
4. 4 samoprzylepne etykiety z indywidualnym numerem testu
5. Protokół pobrania materiału dla laboratorium